

Patienteninformation

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen wurde heute eine moderne Apparatur eingesetzt. Es ist ein **BioBiteCorrector** (BBC).

Er sorgt für eine richtige Unterkieferposition und dafür, dass die Zähne richtig miteinander verzahnen. Wie Sie schon bemerkt haben, ist der **BioBiteCorrector** von außen kaum sichtbar.

Die Apparatur ist mitarbeitsunabhängig, wirkt 24 Stunden pro Tag und ist deshalb sehr erfolgreich.

Damit der BioBiteCorrector auch bei Ihnen erfolgreich wirkt, sollten Sie Ihren BBC genau kennen lernen und einige Dinge beachten:

Wie ist der BBC im Ihrem Mund befestigt worden?

Der BBC ist im Oberkiefer und Unterkiefer fest an dem Drahtbogen unbeweglich verschraubt. Der Drahtbogen wird über die Brackets, welche an Ihren Zähnen kleben, in seiner Position gehalten.

Auf welche Dinge muss ich achten?

1. Die Brackets könnten sich beim Essen lösen. Sie sollten darauf achten, dass Sie beim Zerkauen der Speisen Ihren BBC nicht mitbenutzen. Das Essen sollte sich somit nicht zwischen den BBC legen. Ansonsten erzeugen Sie eine so große Kraft, dass sich die Brackets von den Zähnen lösen oder sich der BBC verbiegt.
2. Gelegentlich kann sich eine Klemmschraube lösen, so dass sich der Befestigungskörper auf dem Drahtbogen verschieben lässt. Sollte dies der Fall sein, vereinbaren Sie bitte direkt einen Termin mit Ihrem Kieferorthopäden/in.
3. Der BBC setzt voraus, dass alle Brackets an den Zähnen kleben. Löst sich ein Bracket muss dieses sofort repariert werden. Melden Sie sich auch aus diesem Grund bei Ihrem Kieferorthopäden/in, um einen Termin zu vereinbaren.

Falls Sie sich unsicher sind, zögern Sie nicht Ihren Kieferorthopäden/in anzurufen!